pullo das transportierende Bettlaken



Patienten, die im Bett nach unten zum Fußende rutschen, können mit dem StretchLift pulla wieder nach oben in Richtung Kopfende bewegt werden:

- einfach und schnell per Knopfdruck
- ohne Schmerzen für den Patienten
- ohne Kraftaufwand für den Pflegenden

Der StretchLift <u>pulla</u> besteht aus einem standfesten, höhenverstellbaren Rahmen mit elektrisch angetriebener Transportwelle und wird einfach an das Kopfende des Bettes gestellt.

Der Patient liegt auf dem Transportlaken (4 m lang, aus 100% Cotton) und wird mit diesem nach oben zum Kopfende hin gezogen.



Artikel-Nr. 8266001



Das Transportlaken liegt aufgerollt am Fußende. Eine saugende Auflage lässt sich problemlos auch mit pullo benutzen.

Zubehör:

- ① Transportlaken, 4 m lang standard Artikel-Nr. 8265901
- ① Transportlaken, 6 m lang Artikel-Nr. 8269701
- ② Abstandhalter Artikel-Nr. 8266002 für Betten mit außenliegendem Motor
- 3 Aufwickelrolle Artikel-Nr. 8803027
- Spann-Gleit-Laken SGL siehe Prospekt "Spann-Gleit-Laken" zur Verbesserung der Gleiteigenschaften auf rauen oder labilen Matratzen. Max. Patientengewicht: 300 kg

Eine Hochlagerung des Körpers ist notwendig:

- · zur Wahrnehmung der Umgebung
- zur Teilnahme am täglichen Geschehen
- · zur Erleichterung der Atmung
- bei Schleimbildung im Rachenraum
- zur Aufnahme von fester Nahrung und Flüssigkeit bei oraler Ernährung
- zur Rückflusshinderung bei Ernährung mit Magensonde
- zur Verhinderung (Erleichterung) des Erbrechens (Erstickungsgefahr)

Technische Daten:

Das transportierende Bettlaken pullo

Tragfähigkeit: 150 kg

Hubgeschwindigkeit: ca. 30 mm / s Einschaltdauer: 7 min. (KB 3 min.)

Steuerung: Wippschalter


Antrieb: Elektromotor 230 V / 50 Hz; 190 W

Schutzart: IP 21

Elektrischer Anschluss: 3 m Kabel an Steckdose

Gewicht: ca. 11 kg

Transportlaken: 80 x 400 cm, 100% Cotton

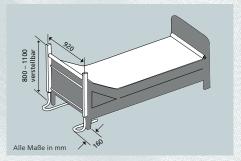

Œ











Indikationen:

Derartige Produkte können dann zum Einsatz kommen, wenn der Pflegebedürftige z.B. aufgrund einer erforderlichen Hochlagerung des Kopfes und Oberkörpers zum Fußende des Bettes rutscht und es ihm aufgrund fehlender Kraft und Mithilfefähigkeit nicht mehr möglich ist, bei einer Lagekorrektur mitzuwirken oder die Lagekorrektur durch die Pflegekraft nicht adäquat durchgeführt werden kann.

und

die Vermeidung des "Runterrutschens" nicht durch andere Maßnahmen (z.B. Bettverkürzungen, Einsatz von Lagerungshilfen, Einsatz einer 5-fach verstellbaren Liegefläche) erreicht werden kann.

Hilfsmittel-Nr.: 50.45.09.0001