

Katapultsitz Uplift

Artikel 3801300

BETRIEBSANLEITUNG

Inhaltsübersicht	Seite
1. Vorwort	3
2. Kontrolle der Lieferung	
2.1. Lieferumfang	3
2.2. Transportschaden	3
3. Gesamtüberblick	4
4. Handhabung	
4.1. Einstellung der Hubkraft	4
4.2. Einsetzen des Uplifts	5
4.3. Hinsetzen mit dem Uplift	5
4.4. Aufstehen mit dem Uplift	5
4.5. Schließen zum Transport	5
5. Sicherheitshinweise	6
6. Pflege	6
7. Technische Daten	6
8. Garantie	7

1. Vorwort

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unserem Hause durch die Wahl unseres Katapultsitzes Uplift entgegengebracht haben.

Mit dem Katapultsitz (Art.-Nr. 3801300) kann jeder Stuhl in einen Aufrichtstuhl verwandelt werden. Er unterstützt das Aufstehen oder Hinsetzen in den Stuhl, welches Sie jetzt ganz ohne fremde Hilfe bewältigen können. Der Uplift hebt 80% des Körpergewichtes hoch. Aber auch das Hinsetzen wird sehr viel einfacher: das Hinsetzen wird hydraulisch gedämpft, Sie plumpsen nicht mehr in den Stuhl hinein.

Der Sitz ist sicher, flexibel und bietet eine stabile Sitzposition. Er ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet, so daß keine elektrischen Motoren erforderlich sind.

Sie können zwischen 6 verschiedenen Positionen zum Einhängen der Gasdruckfeder wählen.

Auf der Unterseite ist der Sitz mit einer Antirutschbeschichtung versehen, damit der Sitz auch auf glatteren Stoffen nicht ins Rutschen kommt.

2. Kontrolle der Lieferung

Die Kontrolle der Lieferung hat meist Ihr Fachhändler schon durchgeführt. Sollten Sie einen anderen Weg der Zustellung gewählt haben, empfehlen wir Ihnen, die Lieferung wie folgt zu kontrollieren:

2.1. Lieferumfang

Vergleichen Sie Ihre Bestellung mit der empfangenen Lieferung.

Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an den zuständigen Fachhändler.

2.2. Transportschaden

Ein Transportschaden soll nicht Ihr Schaden sein!

So verhalten Sie sich im Schadensfall richtig:

Wenn die Verpackung beschädigt ist, in Gegenwart des Anlieferers sofort auspacken und den Schaden auf dem Frachtbrief bescheinigen lassen.

Bei Anlieferung durch Post- oder Paketdienste eine Bestätigung ausstellen lassen.


Anschließend das Transportunternehmen verständigen.

Wenn die Verpackung in Ordnung, der Inhalt aber beschädigt ist, sofort das anliefernde Transportunternehmen schriftlich verständigen und eine Bescheinigung beantragen. Eine Bescheinigung des Schadens auf dem Frachtbrief vornehmen lassen.

Bei Anlieferung durch Post- oder Paketdienste eine Niederschrift beantragen.

Die Meldefrist für einen Schaden beträgt bei Post- und Paketdiensten 24 Stunden, bei Speditionen 7 Tage. Bei Nichtbeachtung entfällt die Ersatzpflicht des Transportunternehmers!

3. Gesamtüberblick

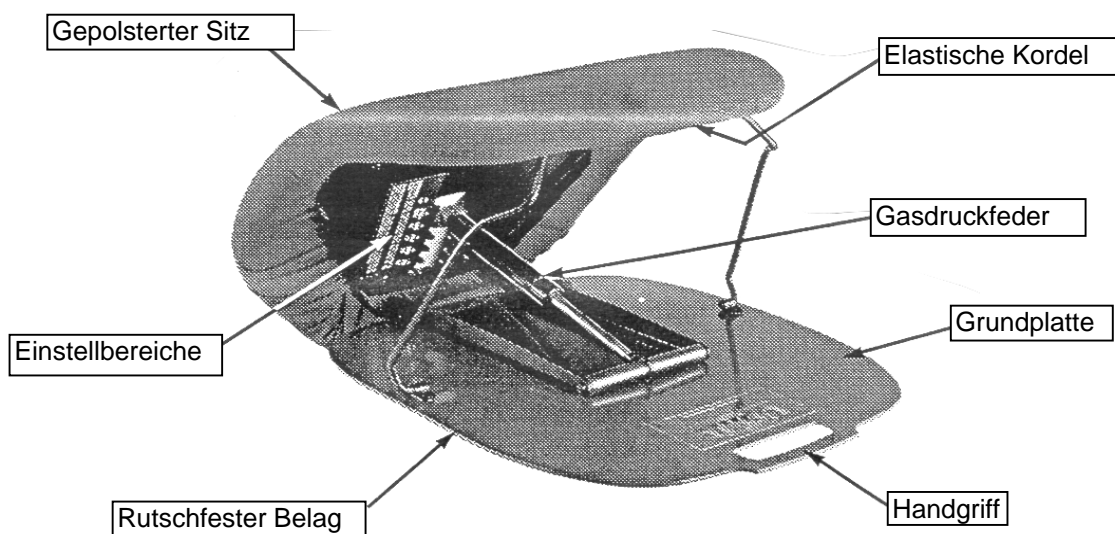

4. Handhabung

4.1. Einstellung der Hubkraft

1. Stellen Sie das Gerät auf das Scharnierteil, der Handgriff zeigt nach oben.
2. Drücken Sie die Vorderkante des gepolsterten Sitzes nach unten (Siehe Bild A). Dadurch spreizt die Grundplatte etwas ab und die Gasdruckfeder löst sich aus der Rasterschiene. Dieses Spreizen ist konstruktiv vorgesehen und schadet dem Gerät nicht.
3. Wählen Sie die der Gewichtseinstellung in kg (Bild B). Die Skala soll nur einen groben Anhalt geben. Nach Auswahl der Hubkraft-Stufe fügen Sie den Bolzen der Gasdruckfeder in die Raste. **Stellen Sie dabei sicher, daß der Bolzen richtig in der Raste ruht.**

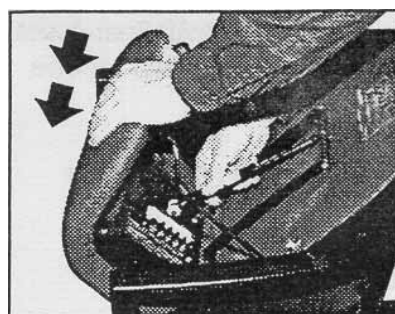


Bild A



Bild B

Hinweis!

Wählen Sie eine zu Ihrem Körpergewicht eine Hubkraft-Stufe, so wird das Hinsetzen zwar erleichtert, doch wird die Unterstützung beim Aufstehen ebenfalls geringer sein. Sie sollten die für Sie angenehmste Position am einfachsten durch "Probieren" herausfinden.

4.2. Einsetzen des Uplifts

Generell soll die Vorderkante des Uplifts vor der Vorderkante der Sitzgelegenheit, auf der Sie das Gerät einsetzen, sein. D. h. legen Sie den Uplift so auf die Oberfläche der Sitzgelegenheit, daß die Grundplatte des Katapultsitzes flach aufliegt.

Auf Sitzgelegenheiten, die sehr tief sind (Sitztiefe) und eine weiche Polsterung haben, kann der Uplift auch mehr nach hinten aufgelegt werden. Wenn Sie den Katapultsitz benutzen, sollten Sie sich an den Armlehnen oder einer anderen Unterstützung zu Ihrer eigenen Sicherheit festhalten.

Bild C zeigt, wie das Gerät auf einem Stuhl mit fester Sitzplatte eingesetzt wird.

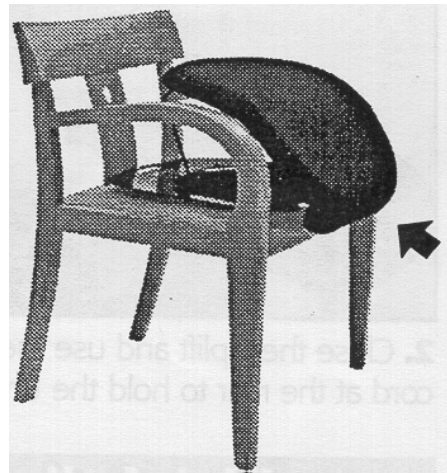


Bild C

4.3. Hinsetzen mit dem Uplift

Nachdem Sie die Hubkraft-Stufe eingestellt haben und den Uplift auf die Sitzgelegenheit gelegt haben, setzen Sie sich auf das Gerät. Es wird Sie langsam und angenehm auf die Sitzfläche gleiten lassen (**Bild D**).

Beachte!

Wenn sich der Uplift nicht niederdrücken läßt, während Sie sich setzen, sollten Sie die Einstellung der Hubkraft-Stufe überprüfen und falls ein geringeres Gewicht einstellen.

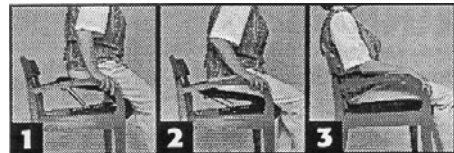


Bild D

4.4. Aufstehen mit dem Uplift

Wenn Sie aufstehen möchten, machen Sie es in der gleichen Weise, wie Sie normalerweise aufstehen. Lehnen Sie sich leicht nach vorne und stoßen Sie sich mit den Armen an den Armlehnen leicht hoch. Der Uplift wird diese Aufwärtsbewegung so weit unterstützen, bis Sie fast senkrecht stehen (**Bild E**).



Bild E

4.5. Schließen zum Transport

1. In der gleichen Weise, wie Sie die Hubkraft-Stufe einstellen, lösen Sie die Gasdruckfeder aus der betreffenden Raste (**Bild F**).
2. Legen Sie die Gasdruckfeder gegen die Grundplatte und klappen Sie diese gegen den Sitz. Nun legen Sie die elastische Kordel über den Handgriff (**Bild G**).

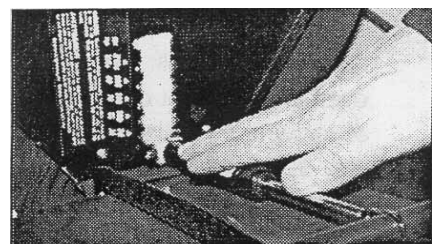


Bild F

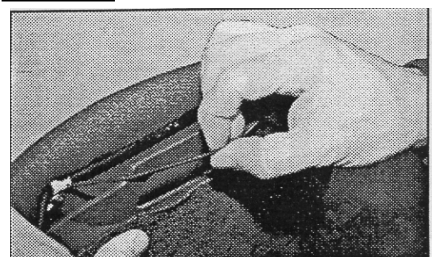


Bild G

5. Sicherheitshinweise

- Der Uplift soll normalerweise in einem Rollstuhl mit Armlehnen verwendet werden, damit optimale Seitenführung gegeben ist.
- Das Gerät kann auch auf weichen Sesseln und auf Sofas eingesetzt werden.
- Wenn Sie den Uplift in einem Rollstuhl verwenden, stellen Sie sicher, daß die Bremsen angezogen sind.
- Stellen Sie sicher, daß die Sitzgelegenheit, auf der der Uplift eingesetzt wird, fest auf dem Boden steht und nicht nach hinten rutschen kann. Wenn Sie Zweifel haben, daß die Sitzgelegenheit vielleicht doch auf dem Untergrund rutschen kann, stellen Sie diese mit dem Rücken an eine Wand oder stellen Sie auf eine andere Weise sicher, daß ein Verrutschen unmöglich wird.

6. Pflege

Das Sitzkissen ist mit einem strapazierfähigem doppelgewebten Polyesterbezug versehen. Der Uplift kann feucht gereinigt werden. Man verwendet warmes Wasser und Seife als Reinigungsmittel und trocknet ihn mit einem Tuch ab. Eine regelmäßige Anwendung von Desinfektionsmitteln ist nur beim Einsatz im Krankenhaus notwendig. Das widerstandsfähige Material kann nahezu jedem Mittel, das normalerweise zur Desinfektion von wiederverwendbaren medizinischen Ausrüstungsgegenständen verwendet wird, desinfiziert werden.

Hinweis!

Eine mangelhafte oder vernachlässigte Pflege des Gerätes führt zur Einschränkung der Produzentenhaftung

7. Technische Daten

Sitztiefe:	46 cm
Sitzbreite:	43 cm
Gewichtseinstellungen:	35, 50, 60, 75, 85, 105+ kg
Max. Belastung:	115 kg
Transportgewicht:	3,7 kg
Sitzhöhe:	+2,5 cm



Dieses Produkt ist konform mit der
EG – Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

8. Garantie

Für den Katapultsitz Uplift Haltegürtel, Artikel 3801300 übernehmen wir im Rahmen unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 2 Jahre Garantie für einwandfreie Beschaffenheit. Technische Änderungen im Sinne des Fortschrittes behalten wir uns vor.

Für den Fall, daß Sie einen Uplift zu bemängeln haben, senden Sie uns bitte mit Ihrer Begründung in jedem Falle den nachfolgenden Garantie-Abschnitt zu. Vergessen Sie nicht, uns darin die gewünschten Angaben über die Artikelbezeichnung, Lieferschein-Nr., das Lieferdatum sowie Ihren Fachhändler mitzuteilen.

Achtung!

Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie unsachgemäß durchgeführte Pflege- und Instandsetzungsarbeiten als auch insbesondere technische Änderungen und Ergänzungen (Anbauten) ohne Zustimmung der Firma MEYRA führen zum Erlöschen sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung allgemein.

Hinweis!

Diese Betriebsanleitung als Bestandteil des "Katapultsitzes Uplift, Artikel-Nr. 3801300" ist bei jedem Benutzer- oder Besitzerwechsel diesem mitzugeben.

Ausfüllen! Im Bedarfsfall ausschneiden und einsenden.

<h1>GARANTIE</h1>	
Artikelbezeichnung:	Lieferschein-Nr.:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rahmen-Nr.:	Lieferdatum:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stempel vom Fachhändler:	
<input type="text"/>	
MEYRA Wilhelm Meyer GmbH & Co. KG Postfach 1703, D-32591 Vlotho Telefon (05733) 922-0 Telefax (05733) 922-143	Firmensitz: Meyra Ring 2 D-32689 Kalletal- Kalldorf

205 327 400 • (Stand: 1998-07) Technische Änderungen vorbehalten!