

GEBRAUCHSANWEISUNG



Die vorliegende Gebrauchsanweisung ist dem Anwender unbedingt vorzulegen!

Artikel- Nr.: 10590-10
Typ: Wannen-Einstieggriff



Bedienungsanleitung:

Dieser Edelstahl Wannen-Einstieggriff, gefertigt aus Werkst. 1.4301, eignet sich als Halteelement für Badewannen. Der Griff ist mit 2 verstellbaren Wannenwulst- Halteschenkeln, 2 Feststell-schrauben und Wannenpuffern ausgestattet. Durch lockern der Schrauben, lässt sich der Griff verstellen und an die Wannengröße anpassen.

Der Edelstahl ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen und zu desinfizieren, damit die Langlebigkeit erhalten bleibt. Zur Reinigung und Desinfektion sind nur phosphatfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel ohne scheuernde Wirkung zu verwenden.

Beim Einsetzen des Griffes sind die Sicherheitshinweise zu beachten.

Techn. Daten:

Rohrdurchmesser:	25 mm
Gesamthöhe:	410 mm
Gesamtbreite:	320 mm
Griffhöhe ab Wannenrand:	130 mm
Gesamttiefe:	flexibel
Gewicht:	1,5 kg

Sicherheitshinweise

Es ist darauf zu achten, dass der Griff nicht auf dem Wannenrand hin und her rutscht. Für die Sicherheit des Benutzers muss auf eine feste Verschraubung geachtet werden. Dieser Artikel darf nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (nicht missbräuchlich) verwendet werden.

Die Bedienungsanleitung sowie die Sicherheits- und Montagehinweise sind unbedingt zu beachten!



VERTRIEB:

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
D-88316 Isny im Allgäu
www.drivemedical.de