

Bedienungsanleitung

Modell 3010092

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie unserem Hause durch die Wahl dieses Produktes entgegengebracht haben.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich mit der Handhabung dieses Produktes vertraut zu machen, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten.

Vor dem Erstgebrauch lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Empfangskontrolle

Packen Sie das Produkt bitte komplett aus und prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden. Sollten Sie feststellen, dass dieses Produkt oder die Sendung wider Erwarten einen Fehler aufweist, so:

1. reklamieren Sie unverzüglich beim Frachtführer,
2. lassen Sie den Schaden protokollieren,
3. informieren Sie uns oder Ihren Fachhändler unverzüglich.

Montage

Wir liefern das Produkt zerlegt. Die Montage ist einfach.

1. Verschrauben Sie beide Seitenrahmen mit dem oberen Sitzrahmen.
2. Verschrauben Sie die untere Traverse mit den vorderen Beinen des Hilfsmittels.
3. Verschrauben Sie die Sitzbrille mit dem Sitzrahmen.
4. Richten Sie die Höhe der Armlehnen (Einstekrohre der Beine teleskopieren) so ein, dass der Benutzer sich beim Abstützen aufrecht stellen kann. Bei zu niedrig eingestellter Stützhöhe ist das nicht möglich.

Maße

WC-Sitzhöhe	400 – 580 mm
Breite	520 mm
Tiefe	520 mm
Spritzschutzhöhe	Ca. 150 mm
Gewicht	12kg
Sitzhöhe	440-620 mm
Max. Belastung	130 kg

Sicherheitshinweise

Trotz der stabilen Bauweise unterliegen die Bauteile einem gewissen Verschleiß. Daher wird empfohlen, das Toilettenstützgestell alle 6 Monate von einem Fachmann kontrollieren zu lassen. Hierbei ist auch auf den festen Sitz von Niet- und Schraubverbindungen zu achten! Erneuern Sie unverzüglich die Gummipuffer für den Fall, dass

ein Gummipuffer unter den Füßen defekt sein sollte.

Vergewissern Sie sich, dass die Federverschlüsse nach dem eventuellen Verstellen wieder fest eingerastet sind.

Achten Sie darauf, dass beim Benutzen immer alle vier Füße fest auf dem Boden stehen.

Reinigung

Zum Reinigen verwenden Sie eine Desinfektionslösung.

Der Rahmen kann notfalls mit einem Dampfstrahlgerät gereinigt werden.

Reparaturen

Verwenden sie ausschließlich MEYRA-Ortopedia-Original-Ersatzteile.

Bedienen Sie sich der Serviceleistungen Ihres geschulten Fachhändlers.

Entsorgung

- Die Geräteverpackung kann der Wertstoffwiederverwendung zugeführt werden.
- Die Metallteile können der Altmetallverwertung zugeführt werden.
- Kunststoffteile können der Wiederverwertung zugeführt werden.
- Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.
- Fragen Sie bitte bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung nach örtlichen Entsorgungsunternehmen.

Maximale Belastung

Das Produkt darf mit max. 130 kg belastet werden

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit für dieses Produkt beträgt 24 Monate und erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Verschleißteile und Teile/Baugruppen, die einer bestimmungsgemäßen Abnutzung unterliegen sowie Schäden, die sich als Folge übermäßiger Beanspruchung, unrichtiger Behandlung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Aus Gründen der Produkthaftung dürfen Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur vom autorisierten Fachhändler unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Änderungen

bedingt durch technische Verbesserungen und Design-Modifikationen bleiben vorbehalten.
Wir wünschen, dass Ihnen das MEYRA-Ortopedia-Produkt stets gute Dienste leistet.

Hersteller:

Swereco Rehab AB
Hovslagargatan 5
S 11148 Stockholm



Dieses Produkt ist konform mit der
EG-Richtlinie 93/42/EWG für
Medizinprodukte.

MEYRA®
ORTOPEDIA

Wir bewegen Menschen.

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 · D-32689 Kalletal-Kalldorf
Postfach 1 703 · D-32591 Vlotho
Fon 05733 922-355
Fax 05733 922-9355
info@meyra-ortopedia.de
www.meyra-ortopedia.de