

BEDIENUNGSANWEISUNG (02/12)

Steckachse/Achsbolzen für Rasant und Radun



Bild 1: Zahnscheibe mit Führungsblech



Bild 2: Rad mit Aluabdeckung



Bild 3: Sicherheitsmutter hinter dem Anbauteller

Um die Steckachse entfernen zu können, muss die

- Innere Fixierung (Laserblech mit 3 Schrauben, Bild 1) der Zahnscheibe und
- die äußere Aluabdeckung mit den 3 Schrauben entfernt werden (Bild 2).

Die Steckachse vorn eindrücken und aus der Radnabe herausziehen. Der Achsbolzen wird mit der dünnen Scheibe durch die Radnabe gesteckt. Jetzt die Aluabdeckung wieder aufschrauben, die Zahnscheibe einlegen und mit dem Laserblech fixieren. Anschließend den Achsbolzen mit Rad durch den Anbauteller stecken und hinter dem Teller mit der größeren Scheibe und der Sicherheitsmutter verschrauben (Bild 3).

Achtung!!! Die Schraube so weit festziehen, dass das Rad nur noch wenig Spiel hat. Das Rad muss sich dann immer noch ganz leicht drehen lassen.